

Doff n' Donner

Indicaties:

De Doff n' Donner kan gebruikt worden voor het aan- en uittrekken van bijna alle compressiekousen ongeacht type, maat of drukklasse. De Doff n' Donner maakt hierbij gebruik van hydrauliek.

Contra-indicaties:

Gebruik dit hulpmiddel niet bij een hypergevoelige huid of actieve diepe veneuze trombose.

Gebruiksaanwijzingen:

Omdat de Doff n' Donner voor bijna alle knie-, lies- en armkousen gebruikt kan worden zijn er veel manieren deze te gebruiken. Op onze website vindt u een aantal video's voor diverse scenario's. U kunt natuurlijk ook uw compressiekousen specialist vragen u te helpen met een voor u passende gebruiksmethode.

Waarschuwingen en voorzorgen:

- Verhit dit product op geen enkele manier
- Gebruik dit product niet bij een actieve diepe veneuze trombose
- Houd dit product buiten bereik van kinderen en huisdieren
- Trek dit product niet over het hoofd
- Vermijd scherpe objecten zoals bijvoorbeeld sieraden
- Raadpleeg uw specialist voor gebruik
- Te gebruiken door één persoon tenzij de Doff n' Donner op de juiste manier gedesinfecteerd wordt

Schoonmaken en onderhoud:

De Doff n' Donner cuff dient op kamertemperatuur bewaard te worden, bij voorkeur op de cone. Voor het schoonmaken van de cuff zijn speciale desinfectiezakken verkrijgbaar, u kunt hiervoor water en zeep gebruiken (bij voorkeur anti-bacteriële zeep) of isopropyl alcohol.

De Doff n' Donner cuff is gevuld met zeepachtig water. Dit kan makkelijk verwijderd worden van (be) kleding of vloerbedekking indien de cuff zou lekken.

sigvaris

Wat is een Doff n' Donner?

De Doff n' Donner cuff is een oneindig gevormde, rekbaar waterballon die als hulpmiddel wordt gebruikt voor het aan- én uittrekken van bijna alle typen compressiekousen in alle drukklassen.

Het verschil met andere aantrekhulpen is dat de Doff n' Donner alle soorten kousen even goed kan aan- als uittrekken. Uniek is dat het hulpmiddel zich aanpast aan de kous en niet omgekeerd. Hierdoor verlengt de levensduur van de kousen enorm.

De Doff n' Donner is uitgevonden om te duwen in plaats van aan de kous te trekken. Hierdoor is minder kracht nodig, wat zorgt voor een gemakkelijk en comfortabel gebruik zowel voor gebruiker als voor zorgverleners.

Omdat de cuff zich aanpast aan de kous en de vorm van been of arm, rolt de cuff eenvoudig en direct over bandages, ingesmeerde ledematen en zelfs pleisters.

Er zijn video's voor elk aantreksscenario te vinden op onze website.

De Doff n' Donner is exclusief verkrijgbaar bij:



proflebo

Hekkehorst 28
7207 BN Zutphen
T +31 (0)575 725999
E sigvaris@proflebo.nl
W proflebo.nl

Exclusief distributeur van:

sigvaris

sigvaris

DOFF N' DONNER



03-2024 Druk- en zettfouten voorbehouden.

DOFF N' DONNER

Standaard gebruiksmethode

Hieronder vindt u een standaard methode om de Doff n' Donner (DnD) te gebruiken.

Elke methode bestaat uit 3 stappen:

1. Rollen van de compressiekous
2. Aantrekken van de compressiekous
3. Uittrekken van de compressiekous

Mocht deze standaardmethode u niet helpen, vraagt u dan uw kousen- of hulpmiddelenleverancier om uitleg.

ROLLEN van de kous



STAP 1

- Plaats de Cone met zuignap op een geschikte en zuivere ondergrond
- Plaats kous over de Cone; zorg dat de bovenkant mooi glad is
- Bij een open teen bevindt de teenband zich net onder bovenste ronding



STAP 2

- Neem kous en DnD met beide handen tussen duim en wijsvinger
- Breng kous + DnD met 2 handen naar boven totdat DnD helemaal bedekt is

N.B.

Kous hoeft niet om DnD "gevouwen" te worden; laat de hydrauliek zijn werk doen



STAP 3

- Verplaats de handen om de DnD
- Rol de DnD helemaal van de Cone af; niet er af trekken



STAP 4

- Zorg dat het teenstuk glad is
- Is dit niet het geval dan kan, door met 1 hand in de DnD te gaan, het teenstuk naar buiten worden geduwd totdat het teenstuk glad is.
- Bij een open teen moet de teenband zich ca 2 cm onder de rand van de DnD bevinden

Kous AANTREKKEN



STAP 5

- Kruis uw been over het andere
- Zorg dat het hielstuk van de kous naar de grond gericht is
- Het gladde teenstuk, of de zijde met de teenband wordt tegen de tenen geplaatst



STAP 6

- Breng de DnD naar u toe totdat de DnD voorbij de enkel is
- U kunt nu de DnD loslaten
- Controleer of het teen- en hielstuk goed zitten
- Is dit niet het geval, rol terug en probeer opnieuw



STAP 7

- Rol DnD met 2 handen helemaal af
- Dit kan ook tot over de knie bij langere kousen



STAP 8

- Plaats met uw handen de boord zoals gewenst
- Verwijder de DnD

N.B.

Eventuele plooiën kunnen met de rubberen handschoenen van Sigvaris weg gewreven worden.

Kous UITTREKKEN

Voer achtereenvolgens stap 8 - 7 - 6 tot 5 uit. De compressiekous is na het uittrekken meteen weer gereed om aangetrokken te worden!

UITTREKKEN

- Breng DnD over het been naar de boord van de kous
- Neem de boord en DnD met twee handen tussen duim en wijsvinger; net als bij het rollen met een Cone
- Rol de kous af tot aan de enkel
- Verplaats uw handen en rol vervolgens over uw enkel de kous van uw voet af
- Wanneer de kous goed is afgerold kan deze indien gewenst ook weer makkelijk worden opgerold