

Gebruikershandleiding Proflebo Basic

1



Vouw de bovenkant van de glijzak ong. 15 cm in de glijzak en plaats deze om uw voet, zover dat uw hiel bedekt is.

2



Sla het boord van de kous ongeveer 10cm terug

3



Trek de kous over de glijzak over uw voet

4



Trek de kous op de gewenste hoogte

5



Pak het uiteinde van de glijzak en trek deze uit de kous

6



Positioneer desgewenst de kous op de juiste hoogte bij uw tenen